

TROUSSE DE SECOURS POUR ENTREPRISE DE 1 À 5 PERSONNES

RÉFÉRENCE **TRS1A5**



DESCRIPTION

- › Fermeture par zip
- › Accroche ceinture par sangle
- › Multi poches de rangement
- › Trousse en PU rouge fluorescent avec croix rétro-réfléchissante



DIMENSIONS

- › 215 mm x 135 mm x 60 mm



POIDS

- › 340 g



1/5 PERSONNES

CONTENU DE LA TROUSSE

- › 1 couverture de survie
- › 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- › 2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- › 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
- › 1 pansement compressif stérile
- › 1 sachet de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm
- › 1 bande extensible de 3 m x 5 cm
- › 1 bande extensible de 3 m x 7 cm
- › 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- › 1 paire de ciseaux Lister 15 cm
- › 1 pince à écharde à mors plats
- › 1 paire de gants jetables
- › 5 compresses imprégnées de solution nettoyante cutanée à la chlorhexidine
- › 1 trio de 0.8 ml de gel à l'arnica
- › 2 compresses imprégnées d'une solution hydro-alcoolique
- › 2 sachets de 5 ml d'eau gélifiée
- › 2 dosettes de sérum physiologique stérile 5 ml
- › 1 livret premiers soins en 10 langues



TOUTEMBAL
WWW.TOUTEMBAL.FR

1101 ZA des Hautes Vallées - 76930 Octeville-sur-mer



1 COUVERTURE DE SURVIE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Emballée individuellement, cette couverture, réalisée en polyester métallisé, protège de la chaleur (coté argenté à l'extérieur) et du froid (coté doré à l'extérieur).

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

Sortir la couverture de son emballage et envelopper la personne :

- › Dans le coté doré (argenté vers l'extérieur) pour la protéger de la chaleur
- › Dans le coté argenté (doré vers l'extérieur) pour la protéger du froid

[!\[\]\(6a9b39b98eb945faa14c645ec99e4eaa_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



PANSEMENTS ADHÉSIFS

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Sous emballage individuel, ils contiennent une compresse non adhérente à la plaie fixée sur une base non tissé multi extensible. Ils permettent la protection des petites plaies, préalablement nettoyées ou désinfectées.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



DIMENSIONS

- > 20 x 72 mm
- > 53 x 70 mm
- > 100 x 60 mm



MODE D'EMPLOI

Sortir la couverture de son emballage et envelopper la personne :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement
3. Enlever les protections plastiques
4. Apposer la compresse sur la partie à protéger
5. Fixer les 2 cotés adhésifs

[!\[\]\(7d1d6890825e83a6a4a51febe2dcc7f3_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



TOUTEMBAL
WWW.TOUTEMBAL.FR

1101 ZA des Hautes Vallées - 76930 Octeville-sur-mer



1 PANSEMENT COMPRESSIF STÉRILE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Conditionné individuellement sous emballage stérile, ce pansement se compose d'une compresse non adhérente de 8 cm x 10 cm, cousue sur une bande extensible.

Produit à usage unique, à jeter après usage



MODE D'EMPLOI

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement compressif
3. Le dérouler jusqu'à l'apparition de la compresse
4. Poser la compresse sur la zone à protéger
5. Enrouler la bande autour du membre concerné
6. Accrocher la bande à l'aide d'un sparadrap, d'une épingle de sûreté, ou en la glissant sous elle-même

[!\[\]\(758ebdf4629c903da74c2e079717ae32_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



1 SACHET STÉRILE DE 5 COMPRESSES EN NON TISSÉ

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Emballées par 5 dans un sachet stérile, elles sont destinées à nettoyer ou à désinfecter une peau lésée. Elles sont à utiliser en complément d'un nettoyant et assainissant cutané de type chlorhexidine.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



DIMENSIONS

› 7.5 x 7.5 CM



MODE D'EMPLOI

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir la compresse et :
 - › Pour une protection : poser la sur la partie à protéger. Fixer la à l'aide d'un sparadrap
 - › Pour un nettoyage : pulvériser le produit sur l'endroit à nettoyer, ou sur la compresse, puis tamponner

[!\[\]\(799877f5c2f906134441300079881630_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



TOUTEMBAL
WWW.TOUTEMBAL.FR

1101 ZA des Hautes Vallées - 76930 Octeville-sur-mer



2 BANDES EXTENSIBLES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Sous emballage individuel, ces bandes permettent le maintien des compresses, des pansements. Elles permettent également de protéger les articulations.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



2 DIMENSIONS

- > 3 m x 5 cm
- > 3 m x 7 cm



MODE D'EMPLOI

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir la bande et poser la sur la partie à protéger
3. Fixer la à l'aide d'un sparadrap

[!\[\]\(104fbf564e2e5a8fbd84f31656d114c7_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



1 PAIRE DE CISEAUX

Ils permettent de découper les pansements, compresses, bandes. Ils peuvent être nettoyé et désinfecté avec une solution alcoolisée.




DIMENSIONS

> 15 cm

[< RETOUR AU SOMMAIRE](#)

**TOUTEMBAL**
WWW.TOUTEMBAL.FR

1101 ZA des Hautes Vallées - 76930 Octeville-sur-mer

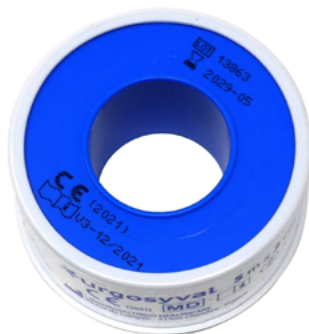

1 ROULEAU DE SPARADRAP

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Rouleau de sparadrap hypoallergénique sécable sans ciseaux.



DIMENSIONS EXISTANTES

› 5 m x 2 cm



MODE D'EMPLOI

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir la bande et poser la sur la partie à protéger
3. Fixer la à l'aide d'un sparadrap

[!\[\]\(4688aadfd656ded00cd6bdfae55089a9_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



1 PINCE À ÉCHARDES

Permet d'enlever tous types de corps étrangers : échardes, petits copeaux de verre, de métal, qui se seraient introduit sous la peau. Elle peut être nettoyée et désinfectée avec une solution alcoolisée.

[!\[\]\(e10773081adcaeab632f9dd4c8931cd5_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



1 PAIRE DE GANTS JETABLES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

En sachet individuel et de taille unique, il permet la protection du soigneur.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir les gants
3. Les enfiler sur mains préalablement nettoyées

[!\[\]\(f2b341b2842f84b06275b7e52ec9f0ae_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



5 COMPRESSES IMPRÉGNÉES D'UNE SOLUTION À BASE DE CHLORHEXIDINE

(produit biocide: utilisez les produits biocides avec précaution)

Compresse douce imprégnée d'une solution nettoyante et assainissante cutanée à action immédiate. Inodore, incolore, et sans alcool, elle ne pique pas.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Appliquer sur l'endroit à traiter

[!\[\]\(67b99c4d964e257c5482ff1b2462b204_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



TRIO D'ARNICA

Trio de 0.8 ml de crème à l'arnica destiné à apaiser les coups et chocs.

La texture, non grasse, pénètre rapidement.



MODE D'EMPLOI

1. Détacher un sachet
2. L'ouvrir selon les pointillés
3. Appliquer en fine couche sur l'endroit à apaiser
4. Masser pour faire pénétrer
5. Renouveler l'opération si nécessaire

[◀ RETOUR AU SOMMAIRE](#)



x 2



2 COMPRESSES IMPRÉGNÉES DE SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Compresse douce imprégnée d'une solution hydroalcoolique destinée à la désinfection des mains avant un soin. Incolore.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Se nettoyer les mains

[!\[\]\(da54fa747b6713d79175de3c1d218b58_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



x 2



2 SACHETS D'EAU GÉLIFIÉE

Destiné à remplacer l'eau en cas de brûlure, ce gel à base d'eau purifiée hydrate les couches supérieures de la peau. Cohésif, sa viscosité l'empêche de couler. Son système de distribution inversé et son goulot central, permettent une application précise, d'une seule main.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

1. Déchirer le sachet en suivant les pointillés
2. Appuyer sur le sachet pour faire sortir le gel
3. Appliquer sur l'endroit à apaiser



RETOUR AU SOMMAIRE



x 2



2 DOSETTES DE SÉRUM PHYSIOLOGIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité. Dosette de 5 ml de sérum physiologique destiné aux lavages et aux rinçages des yeux, des plaies...

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

1. Casser le haut de la dosette
2. Appliquer selon la méthode :
 - › En complément d'une œillère : Verser le contenu de la dosette dans l'œillère puis rincer l'œil
 - › Sans œillère, verser directement le contenu de la dosette sur l'endroit à traiter

[!\[\]\(e9e105440a4f0af15d76f8d500ffbd8a_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



LIVRET 1ERS SOINS

Ce livret, en 10 langues, permet de savoir ce qu'il faut faire en cas d'urgence, et contient tous les numéros utiles.

[!\[\]\(115eff7009a76771e6b7adb966005e4c_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)