

TROUSSE SECOURS COFFRET POUR ENTREPRISE 4 À 8 PERSONNES

RÉFÉRENCE **TRS4A8**



Signalétique avec grippeur autocollant



support mural

DESCRIPTION

- › Polypropylène blanc
- › Poignée de transport et support mural



DIMENSIONS

- › 240 mm x 180 mm x 75 mm



POIDS

- › 670 g



4/8 PERSONNES

CONTENU DE LA TROUSSE

- › 1 couverture de survie
- › 1 écharpe triangulaire
- › 15 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- › 8 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- › 2 pansements compressifs stériles
- › 10 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- › 2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm
- › 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm
- › 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
- › 1 paire de ciseaux Lister 15 cm
- › 1 pince à écharde à mors plats
- › 1 paire de gants jetables
- › 12 épingles de sûreté
- › 1 doigtier en cuir
- › 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
- › 5 compresses d'alcool à 70 °
- › 5 compresses anti-coups au calendula
- › 5 compresses de lotion asséchante
- › 3 compresses imprégnées d'une solution hydroalcoolique
- › 3 sachets de crème réparatrice petites brûlures, petites gerçures
- › 4 dosettes de sérum physiologique stérile
- › 1 lot de 2 mèches hémostatiques stériles Coalgan
- › 1 livret premiers soins en 10 langues



TOUTEMBAL
WWW.TOUTEMBAL.FR

1101 ZA des Hautes Vallées - 76930 Octeville-sur-mer



1 COUVERTURE DE SURVIE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Emballée individuellement, cette couverture, réalisée en polyester métallisé, protège de la chaleur (coté argenté à l'extérieur) et du froid (coté doré à l'extérieur).

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

Sortir la couverture de son emballage et envelopper la personne :

- › Dans le coté doré (argenté vers l'extérieur) pour la protéger de la chaleur
- › Dans le coté argenté (doré vers l'extérieur) pour la protéger du froid

[!\[\]\(6a9b39b98eb945faa14c645ec99e4eaa_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



1 ÉCHARPE TRIANGULAIRE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Emballée individuellement, elle permet de soutenir un bras blessé, ou d'emballer toute partie du corps.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

Sortir l'écharpe de son emballage et la déplier :

- › Glisser l'écharpe entre l'avant bras et le coude tout en laissant un bout sur l'épaule
- › Relever l'autre bout de l'écharpe sur l'autre épaule
- › Rassembler par un noeud plat autour du cou ou fixer la avec une épingle de sûreté

[!\[\]\(4fe57c3593bf1b21d272ae7ac8dfaf77_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



x 15



x 8



PANSEMENTS ADHÉSIFS

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Sous emballage individuel, ils contiennent une compresse non adhérente à la plaie fixée sur une base non tissée multi extensible. Ils permettent la protection des petites plaies, préalablement nettoyées ou désinfectées.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



DIMENSIONS

- › 20 x 72 mm
- › 53 x 70 mm



MODE D'EMPLOI

Sortir la couverture de son emballage et envelopper la personne :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement
3. Enlever les protections plastiques
4. Apposer la compresse sur la partie à protéger
5. Fixer les 2 cotés adhésifs

[!\[\]\(c1168d6a8b365d11e842ece304635fa7_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



2 PANSEMENTS COMPRESSIFS STÉRILES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Conditionné individuellement sous emballage stérile, ce pansement se compose d'une compresse non adhérente de 8 cm x 10 cm, cousue sur une bande extensible.

Produit à usage unique, à jeter après usage



MODE D'EMPLOI

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement compressif
3. Le dérouler jusqu'à l'apparition de la compresse
4. Poser la compresse sur la zone à protéger
5. Enrouler la bande autour du membre concerné
6. Accrocher la bande à l'aide d'un sparadrap, d'une épingle de sûreté, ou en la glissant sous elle-même

[!\[\]\(47734e4656765d20df4fdbd5b7aff048_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



x 10



10 COMPRESSES DE GAZE STÉRILES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Sous emballage individuel stérile, elles sont destinées à nettoyer ou à désinfecter une peau lésée. Elles sont à utiliser en complément d'un nettoyant et assainissant cutané de type chlorhexidine.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



DIMENSIONS

- › 20 x 20 CM dépliée



MODE D'EMPLOI

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir la compresse et :
 - › Pour une protection : poser la sur la partie à protéger. Fixer la à l'aide d'un sparadrap
 - › Pour un nettoyage : pulvériser le produit sur l'endroit à nettoyer, ou sur la compresse, puis tamponner

[!\[\]\(b538fe54c1f3a7343e37e85cc2d00497_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



x 2



x 2

4 BANDES EXTENSIBLES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Sous emballage individuel, ces bandes permettent le maintien des compresses, des pansements. Elles permettent également de protéger les articulations.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



2 DIMENSIONS


- › 3 m x 5 cm
- › 3 m x 7 cm



MODE D'EMPLOI

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir la bande et poser la sur la partie à protéger
3. Fixer la à l'aide d'un sparadrap

[!\[\]\(f219cfc00b8db0cd1a81ae1fc9afaf28_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)

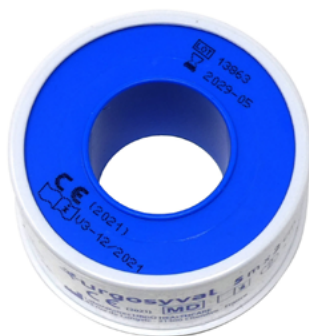

1 ROULEAU DE SPARADRAP

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Rouleau de sparadrap hypoallergénique sécable sans ciseaux.



DIMENSIONS EXISTANTES

› 5 m x 2 cm



MODE D'EMPLOI

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir la bande et poser la sur la partie à protéger
3. Fixer la à l'aide d'un sparadrap

[!\[\]\(4688aadfd656ded00cd6bdfae55089a9_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



1 PAIRE DE CISEAUX

Ils permettent de découper les pansements, compresses, bandes. Ils peuvent être nettoyé et désinfecté avec une solution alcoolisée.



DIMENSIONS

> 15 cm

[!\[\]\(17413706fd4997a1a4bdf85c6864eee1_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)





1 PINCE À ÉCHARDES

Permet d'enlever tous types de corps étrangers : écharde, petits copeaux de verre, de métal, qui se seraient introduit sous la peau. Elle peut être nettoyée et désinfectée avec une solution alcoolisée.

[!\[\]\(339a16584d5da0f0a3ca4e9ec17bf6a1_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



1 PAIRE DE GANTS JETABLES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

En sachet individuel et de taille unique, il permet la protection du soigneur.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir les gants
3. Les enfiler sur mains préalablement nettoyées

[!\[\]\(870f5d5e9c0d57485634be3ecf52f3ca_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



x 12



12 ÉPINGLES DE SÛRETÉ

Lot de 12 épingles permettant de fixer une bande, une écharpe triangulaire.

[!\[\]\(c694a3ff3b077d76910920a6a1593ab4_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



1 DOIGTIER EN CUIR

Fourni avec une lanière permettant de le fixer autour du poignet, ce doigtier en cuir permet de protéger un doigt blessé, ou un bandage.



MODE D'EMPLOI

1. Insérer le doigt dans le doigtier
2. Accrocher la lanière autour du poignet

[!\[\]\(0b5e7e25e8775f7e7e80906ada4f0021_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



1 PULVÉRISATEUR DE 50 ML D'UNE SOLUTION À BASE DE CHLORHEXIDINE

(produit biocide: utilisez les produits biocides avec précaution)

Solution nettoyante et assainissante cutanée à action immédiate. Inodore, incolore, et sans alcool, elle ne pique pas.

Contenu pouvant réaliser jusqu'à 300 applications.



MODE D'EMPLOI

1. Enlever le capuchon
2. Pulvériser directement sur l'endroit à traiter
3. Enlever l'excédent avec une compresse

[!\[\]\(d5d7044e5caf6907399af2dced8d6ff8_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



x 5



5 COMPRESSES IMPRÉGNÉES D'ALCOOL À 70°

(produit biocide: utilisez les produits biocides avec précaution)

Compresse douce imprégnée d'alcool isopropylique à 70°. Cette solution est destinée au nettoyage et à la désinfection de la petite instrumentation ou de la peau saine (paire de ciseau, pince à échardes...). Incolore.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Appliquer sur l'endroit à nettoyer

[!\[\]\(51514032c8ca341817228f39f1307b05_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



x 5



5 COMPRESSES IMPRÉGNÉES DE SOLUTION À BASE DE CALENDULA

Compresse douce imprégnée d'une solution apaisante anti-coups. Inodore, incolore, et sans alcool, elle ne pique pas.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Appliquer sur l'endroit à traiter

[< RETOUR AU SOMMAIRE](#)



x 5



5 COMPRESSES IMPRÉGNÉES DE SOLUTION ASSÉCHANTE

Destiné à remplacer l'eau en cas de brûlure, ce gel à base d'eau purifiée hydrate les couches supérieures de la peau. Cohésif, sa viscosité l'empêche de couler. Son système de distribution inversé et son goulot central, permettent une application précise, d'une seule main.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

1. Déchirer le sachet en suivant les pointillés
2. Appuyer sur le sachet pour faire sortir le gel
3. Appliquer sur l'endroit à apaiser

[!\[\]\(cf531ed27e91483460120fcc057b3901_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



x 3



3 COMPRESSES IMPRÉGNÉES DE SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Compresse douce imprégnée d'une solution hydroalcoolique destinée à la désinfection des mains avant un soin. Incolore.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Se nettoyer les mains

[!\[\]\(6a9b39b98eb945faa14c645ec99e4eaa_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



x 3



3 SACHETS DE CRÈME RÉPARATRICE

Crème réparatrice destinée aux petites brûlures, irritations et aux gerçures cutanées. Elle prévient le dessèchement et les irritations dus aux contacts de substances agressives.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

1. Déchirer le sachet
2. Appuyer sur le sachet pour faire sortir la crème
3. Appliquer sur l'endroit à traiter

[< RETOUR AU SOMMAIRE](#)



x 4



4 DOSETTES DE SÉRUM PHYSIOLOGIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité. Dosette de 5 ml de sérum physiologique destiné aux lavages et aux rinçages des yeux, des plaies...

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

1. Casser le haut de la dosette
2. Appliquer selon la méthode :
 - › En complément d'une œillère : Verser le contenu de la dosette dans l'œillère puis rincer l'œil
 - › Sans œillère, verser directement le contenu de la dosette sur l'endroit à traiter

[!\[\]\(758ebdf4629c903da74c2e079717ae32_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)



x 2



LOT DE 2 MÈCHES HÉMOSTATIQUES STÉRILES COALGAN ®

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Mèches hémostatiques et cicatrisantes composées de fibres d'alginate de calcium d'origine végétale. Produit stérile, à usage unique, à jeter après usage. Toujours utiliser dans son intégralité.

Information complète sur la notice incluse



MODE D'EMPLOI

Saignements de nez :

1. Ouvrir l'emballage
2. Torsader la mèche et l'humidifier avec du sérum physiologique pour faciliter l'introduction dans la narine
3. Insérer dans la narine et pincer les 2 narines pendant 10 minutes
4. Laisser Coalgan® en place au moins 30 min et au max 24 h
5. Utiliser le sachet pour jeter la mèche

Plaies cutanées :

1. Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique
2. Ouvrir l'emballage
3. Appliquer Coalgan® sur la lésion
4. Retirer à l'arrêt du saignement ou laisser en place pour la cicatrisation et le retirer au max à 24 h
5. Utiliser le sachet pour jeter la mèche

[< RETOUR AU SOMMAIRE](#)



LIVRET 1ERS SOINS

Ce livret, en 10 langues, permet de savoir ce qu'il faut faire en cas d'urgence, et contient tous les numéros utiles.

[!\[\]\(950a62bbddad88d64435fd35607dfc42_img.jpg\) RETOUR AU SOMMAIRE](#)