

TROUSSE DE SECOURS POUR VOITURE ET DÉPLACEMENTS 1 À 4 PERSONNES

RÉFÉRENCE **TRSVEH**



DESCRIPTION

- › Tissu imperméable bleu en polyester 600 deniers
- › Fermeture par zip
- › Accroche ceinture par sangle
- › Multi poches de rangement



DIMENSIONS

- › 140 mm x 110 mm x 45 mm



POIDS

- › 250 g



1/4 PERSONNES

CONTENU DE LA TROUSSE

- › 1 couverture de survie
- › 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- › 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- › 1 pansement compressif stérile
- › 4 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- › 1 bande extensible de 3 m x 5 cm
- › 1 bande extensible de 3 m x 7 cm
- › 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- › 1 paire de ciseaux 12 cm courbée à bouts ronds avec anse plastique
- › 1 pince à échardes à mors plats
- › 1 paire de gants jetables
- › 3 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- › 3 compresses d'alcool à 70°
- › 3 compresses anti-coups au calendula
- › 3 compresses de lotion asséchante
- › 2 compresses imprégnées d'une solution hydroal-coolique
- › 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- › 1 livret premiers soins en 10 langues





1 COUVERTURE DE SURVIE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Emballée individuellement, cette couverture, réalisée en polyester métallisé, protège de la chaleur (coté argenté à l'extérieur) et du froid (coté doré à l'extérieur).

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

Sortir la couverture de son emballage et envelopper la personne :

- › Dans le coté doré (argenté vers l'extérieur) pour la protéger de la chaleur
- › Dans le coté argenté (doré vers l'extérieur) pour la protéger du froid

[< RETOUR AU SOMMAIRE](#)



x 10



x 4



PANSEMENTS ADHÉSIFS

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Sous emballage individuel, ils contiennent une compresse non adhérente à la plaie fixée sur une base non tissé multi extensible. Ils permettent la protection des petites plaies, préalablement nettoyées ou désinfectées.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



DIMENSIONS

- > 20 x 72 mm
- > 53 x 70 mm



MODE D'EMPLOI

Sortir la couverture de son emballage et envelopper la personne :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement
3. Enlever les protections plastiques
4. Apposer la compresse sur la partie à protéger
5. Fixer les 2 cotés adhésifs

[< RETOUR AU SOMMAIRE](#)



1 PANSEMENT COMPRESSIF STÉRILE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Conditionné individuellement sous emballage stérile, ce pansement se compose d'une compresse non adhérente de 8 cm x 10 cm, cousue sur une bande extensible.

Produit à usage unique, à jeter après usage



MODE D'EMPLOI

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement compressif
3. Le dérouler jusqu'à l'apparition de la compresse
4. Poser la compresse sur la zone à protéger
5. Enrouler la bande autour du membre concerné
6. Accrocher la bande à l'aide d'un sparadrap, d'une épingle de sûreté, ou en la glissant sous elle-même

[< RETOUR AU SOMMAIRE](#)



x 4



4 COMPRESSES STÉRILES INDIVIDUELLES 20 CM X 20 CM

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Emballées par 5 dans un sachet stérile, elles sont destinées à nettoyer ou à désinfecter une peau lésée. Elles sont à utiliser en complément d'un nettoyant et assainissant cutané de type chlorhexidine.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



DIMENSIONS

- › 20 x 20 CM dépliée



MODE D'EMPLOI

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir la compresse et :
 - › Pour une protection : poser la sur la partie à protéger. Fixer la à l'aide d'un sparadrap
 - › Pour un nettoyage : pulvériser le produit sur l'endroit à nettoyer, ou sur la compresse, puis tamponner

[< RETOUR AU SOMMAIRE](#)



2 BANDES EXTENSIBLES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Sous emballage individuel, ces bandes permettent le maintien des compresses, des pansements. Elles permettent également de protéger les articulations.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



2 DIMENSIONS

- > 3 m x 5 cm
- > 3 m x 7 cm



MODE D'EMPLOI

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir la bande et poser la sur la partie à protéger
3. Fixer la à l'aide d'un sparadrap

[< RETOUR AU SOMMAIRE](#)



1 PAIRE DE CISEAUX

Ils permettent de découper les pansements, compresses, bandes. Ils peuvent être nettoyé et désinfecté avec une solution alcoolisée.



DIMENSIONS

> 15 cm

[< RETOUR AU SOMMAIRE](#)



1 ROULEAU DE SPARADRAP

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Rouleau de sparadrap hypoallergénique sécable sans ciseaux.



DIMENSIONS EXISTANTES

> 5 m x 2 cm



MODE D'EMPLOI

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir la bande et poser la sur la partie à protéger
3. Fixer la à l'aide d'un sparadrap

[< RETOUR AU SOMMAIRE](#)



1 PINCE À ÉCHARDES

Permet d'enlever tous types de corps étrangers : échardes, petits copeaux de verre, de métal, qui se seraient introduit sous la peau. Elle peut être nettoyée et désinfectée avec une solution alcoolisée.

[< RETOUR AU SOMMAIRE](#)



1 PAIRE DE GANTS JETABLES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

En sachet individuel et de taille unique, il permet la protection du soigneur.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir les gants
3. Les enfiler sur mains préalablement nettoyées

[< RETOUR AU SOMMAIRE](#)



3 COMPRESSES IMPRÉGNÉES D'UNE SOLUTION À BASE DE CHLORHEXIDINE

(produit biocide: utilisez les produits biocides avec précaution)

Compresse douce imprégnée d'une solution nettoyante et assainissante cutanée à action immédiate. Inodore, incolore, et sans alcool, elle ne pique pas.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Appliquer sur l'endroit à traiter

[< RETOUR AU SOMMAIRE](#)



x 3



3 COMPRESSES IMPRÉGNÉES D'ALCOOL À 70°

(produit biocide: utilisez les produits biocides avec précaution)

Compresse douce imprégnée d'alcool isopropylique à 70°. Cette solution est destinée au nettoyage et à la désinfection de la petite instrumentation ou de la peau saine (paire de ciseau, pince à échardes...). Incolore.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Appliquer sur l'endroit à nettoyer

[< RETOUR AU SOMMAIRE](#)



x 3



3 COMPRESSES IMPRÉGNÉES DE SOLUTION À BASE DE CALENDULA

Compresse douce imprégnée d'une solution apaisante anti-coups. Inodore, incolore, et sans alcool, elle ne pique pas.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Appliquer sur l'endroit à traiter

[< RETOUR AU SOMMAIRE](#)



x 3



3 COMPRESSES IMPRÉGNÉES DE SOLUTION ASSÉCHANTE

Compresse douce imprégnée d'une solution asséchante à base de sulfate de zinc. Incolore.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

1. Casser le haut de la dosette
2. Appliquer selon la méthode :
 - › En complément d'une œillère : Verser le contenu de la dosette dans l'œillère puis rincer l'œil
 - › Sans œillère, verser directement le contenu de la dosette sur l'endroit à traiter

[< RETOUR AU SOMMAIRE](#)



x 2



2 COMPRESSES IMPRÉGNÉES DE SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Compresse douce imprégnée d'une solution hydroalcoolique destinée à la désinfection des mains avant un soin. Incolore.

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Se nettoyer les mains

[< RETOUR AU SOMMAIRE](#)



x 2



2 DOSETTES DE SÉRUM PHYSIOLOGIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité. Dosette de 5 ml de sérum physiologique destiné aux lavages et aux rinçages des yeux, des plaies...

Produit à usage unique, à jeter après usage.



MODE D'EMPLOI

1. Casser le haut de la dosette
2. Appliquer selon la méthode :
 - › En complément d'une œillère : Verser le contenu de la dosette dans l'œillère puis rincer l'œil
 - › Sans œillère, verser directement le contenu de la dosette sur l'endroit à traiter

[< RETOUR AU SOMMAIRE](#)



LIVRET 1ERS SOINS

Ce livret, en 10 langues, permet de savoir ce qu'il faut faire en cas d'urgence, et contient tous les numéros utiles.

[< RETOUR AU SOMMAIRE](#)